



Родовая кровать

LM-02

Изделие изготовлено
из антибактериального материала. 

www.famed.ru




Родовая кровать

LM-02

Современная 4-х секционная родовая кровать с постоянной секцией сиденья, установленная на 3 колоннах, с электрическим управлением.

Кровать имеет функцию изменения высоты ложа, изменения угла наклона спинной и бедренной секции, продольные наклоны (Тренделенбурга и Антитренделенбурга) и функцию быстрой разблокировки спинной секции (CPR). Кровать имеет три системы управления: центральная панель управления (supervisor), проводной пульт управления и панели управления в боковых ограждениях. Для повышения безопасности пациентки панели управления размещенные с внутренней стороны боковых ограждений оснащены функцией ночной подсветки пола и вызова медицинского персонала. По этой же причине функции проводного пульта управления требуют подтверждения при помощи специального ключа. Панели управления на внешних сторонах боковых ограждений позволяют быстро получить положение Тренделенбурга и Антитренделенбурга. Центральная панель управления позволяет получить положение Фаулера, нулевую позицию, положение для осмотра и положения кардиологического кресла.

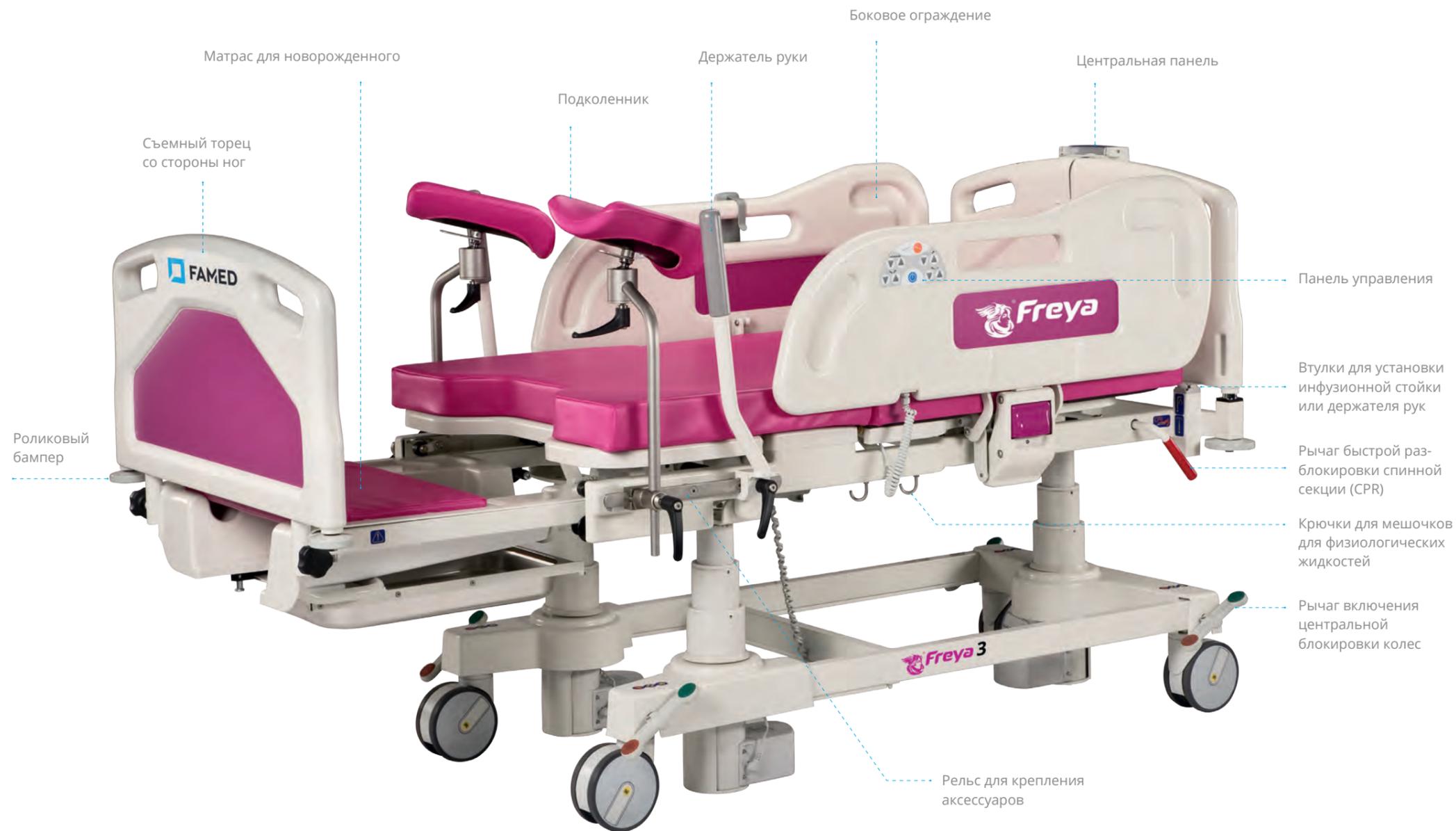

Стандартное оборудование:



Матрас для новорожденного



Съемные пластмассовые вкладыши и лоток для физиологических жидкостей



Центральная панель управления (supervisor)



Рычаг быстрой разблокировки спинной секции (CPR)



Опоры для ног



Подколенники



Преимущества кровати LM-02:

- Широкий диапазон возможных настроек положения
- Три системы управления (одна из которых для пациентки)
- Низкая высота ложа, облегчающая вставание
- Очень хорошие технические характеристики



Ректоскопия



Горизонтальное положение



Горизонтальное положение с матрасом для новорожденного



Полусидячее положение

Выбранные позиции кровати LM-02:

- Кровать можно легко превратить в кресло, обеспечивающее роженице удобное положение во время родов
- Положение кардиологического кресла
- Положение для осмотра
- Положение Фаулера
- Нулевое положение



Гинекологический осмотр



Сидячее положение



Сидячее положение



Управление электрическими функциями при помощи:

- Центральная панель управления (supervisor)
- Проводной ручной пульт с блокировкой (ключ)
- Панели управления на боковых ограждениях с наружной стороны с функцией положения Тренделенбурга и анти-Тренделенбурга
- Панели управления на боковых ограждениях с внутренней стороны с функцией ночной подсветки пола и вызова медицинского персонала
- Ножная панель (опция)



Боковые ограждения

оснащены механизмом для их складывания



Положение Антитренделенбурга

Эксплуатационные параметры:

- Механизмы кровати позволяют изменять высоту ложа, угловое положение спинной секции и секции голени, наклон Тренделенбурга и Антитренделенбурга, а также перемещать кровать.
- Возможность изменения угла положения спинной секции с помощью рычага для CPR.
- Изменение высоты ложа, продольные наклоны (Тренделенбург и Антитренделенбург), изменение угла наклона спинной секции и опоры для ног (секции бедра) осуществляется при помощи электроприводов.



Положение Тренделенбурга

Управление



Центральная панель управления (supervisor)



Центральная панель управления и проводной пульт управления



Панели управления в боковых ограждениях.

Доступные торцы



Торцы пластмассовые цвета RAL 9002 с вставками



Доступные цвета вкладок для торцов

Технические характеристики

Общая длина	2165 мм ± 20 мм
Общая длина в положении кресла	1780 мм ± 20 мм
Максимальная ширина (с боковыми ограждениями)	965 мм ± 5 мм
Минимальная высота рамы ложа	580 ± 10 мм
Максимальная высота рамы ложа	980 ± 10 мм
Угол подъема сиденья	30° ± 5°
Угол подъема спинной секции	70° ± 5°
Положение Тренделенбурга	20° ± 2°
Положение Антитренделенбурга	20° ± 2°
Вес кровати около	160 кг
Допустимая нагрузка	250 кг
Допустимая нагрузка выдвижной секции	170 кг
Питание	230 В~, 50/60 Гц
Потребление мощности	макс 250 VA
Класс защиты	II
Тип рабочей части	B
Степень защиты	не менее IP-X4
Срок эксплуатации	10 лет



Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Poland

Head Office:
tel.: +48 33 866 62 00
fax: +48 33 475 58 90

Export Department:
tel.: +48 33 866 62 58
tel.: +48 33 866 62 65
tel.: +48 33 866 62 66
fax: +48 33 861 46 78

expo.famed@famed.com.pl
www.famed.com.pl



Продукт соответствует требованиям Европейской директивы MDD 93/42 /ЕЭС в отношении обеспечения безопасности медицинских изделий.

Издание 06/2015/01. Компания оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в изделие небольшие изменения, связанные с развитием научно-технического прогресса



www.famed.ru