



Тележка-каталка
для перевозки больных

WP-09



Тележка-каталка для перевозки больных

WP-09

Назначение

Тележка-каталка WP-09 предназначена для перевозки больных в операционные и процедурные залы. Каталка также позволяет использовать рентгеновский аппарат с С-дугой для контроля пациента.



Стандартная конструкция

- Ложе каталки рентгенопрозрачное. Благодаря возможности установки под ложем держателя R-кассеты (опция) рентгеновские снимки можно делать по всей длине ложа.
- Каталка изготовлена из стальных профилей, покрытых порошковой полиэфирно-эпоксидной краской цвета RAL 9002, устойчивой к истиранию и действию дезинфицирующих средств.
- Спинная секция в каталках и секция бедра в каталке с 4-х секционным ложем регулируются при помощи пневмопружины с блокировкой. Регулирование секции голени в 4-х секционном ложе осуществляется с помощью храпового механизма.
- Изменение высоты ложа и продольных наклонов осуществляется при помощи гидроцилиндров, управляемых ножным приводом с помощью рычага.
- Основание каталки закрыто щитками из пластика ABS цвета RAL 9002.
- На щитке основания можно поместить кислородный баллон.
- Каталка имеет матрас и корзину для подручных вещей пациента. Роликовые бамперы, закрепленные в углах ложа, защищают его от повреждений.

Преимущества тележки-каталки

- Диапазон регулировки позволяет регулировать высоту ложа каталки, как до высоты ложа больничной кровати, так и столешницы операционного стола.
- Каталка оснащена механизмом центральной блокировки четырех колес, можно установить пятое колесо.
- Одно из колес является направляющим, для прямолинейного движения.
- Большой диаметр колес (200 мм) делает каталку маневренной и легко управляемой.
- Быстро снимаемый торец со стороны головы пациента.

Дополнительное оснащение

- Боковое ограждение
- Инфузионные стойки
- Ремень для иммобилизации пациента
- Держатель R-кассеты
- Пятое колесо



Технические характеристики

Длина каталки	2100 мм
Общая ширина каталки (без боковых ограждений)	800 мм
Общая ширина каталки (с боковыми ограждениями)	860 мм
Размеры матраса	1920 x 675 x 60 мм
Диапазон регулировки высоты ложа (без матраса)	от 560 до 890 мм
Диапазон регулировки наклона спинной секции	от 0° до 70°
Наклон секции бедра (версия каталки с 4-х секционным ложем)	30°
Наклон секции голени (версия каталки с 4-х секционным ложем)	22°
Положение Тренделенбурга	15°
Положение Антитренделенбурга	15°
Диаметр колес	200 мм
Допустимая нагрузка	250 кг

Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Poland

Head Office:
tel.: +48 33 866 62 00
fax: +48 33 475 58 90



Export Department:
tel.: +48 33 866 62 58
tel.: +48 33 866 62 65
tel.: +48 33 866 62 66
fax: +48 33 861 46 78

expo.famed@famed.com.pl
www.famed.com.pl




Функции каталки, регулируемые при помощи ножного насоса

от 560 до 890 мм

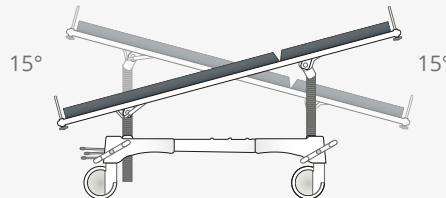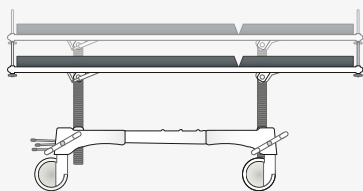

Функции каталки, регулируемые вручную

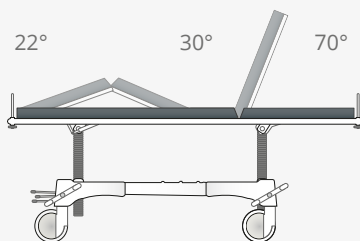

Продукт соответствует требованиям Европейской директивы MDD 93/42 /ЕЭС в отношении обеспечения безопасности медицинских изделий.

Издание 06/2015/01. Компания оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в изделие небольшие изменения, связанные с развитием научно-технического прогресса

www.famed.ru

